

ELEKTROAKUPUNKTURA

Ból, przewlekłe dolegliwości objawowe, czy uzależnienia, to przypadłości, w których terapii świetnie sprawdza się elektroakupunktura

Elektryczna stymulacja zwiększa działanie igieł i może nawet zastąpić manipulowanie nimi.

- Tonifikacja:

użyj niskich częstotliwości (2-5Hz) przez długi czas stymulacji

- Rozproszenie:

użyj wysokich częstotliwości (70-80Hz) przez krótki czas stymulacji

Niezależność kanałów pozwala na jednoczesną stymulację kilkoma igłami w różnych trybach, z łatwością pozwalając na wybór trybu emisji.

Naklejane na skórę elektrody ułatwiają leczenie dzieci i pacjentów obawiających się igieł.

AURIKULOTERAPIA

Dolegliwości objawowe, problemy mięśniowo-szkieletowe, ból, problemy psychologiczne, ... wszystkie są wskazaniami do stosowania aurikuloterapii

Terapia punktów ucha w aurikuloterapii z użyciem częstotliwości Nogiera. Końcówka „Styl’Module” w formie długopisu zapewnia precyzję i komfort pracy.

Urządzenie może być używane w trybie ciągłym, przerywanym lub trybie skanowania.

- 7 dostępnych częstotliwości to częstotliwości Nogiera
A (2,28Hz), B (4,56Hz), C (9,12Hz), D (18,25Hz), E (36,5Hz), F (73Hz), G (1,14Hz).

Częstotliwość 1,14 jest też nazywana uniwersalną częstotliwością (U).

LECZENIE BÓLU

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, ból nocyceptywny, neuralgia, ból fantomowy, akupunktura, działanie przeciwbólowe...

Elektryczna stymulacja pulsacyjna jest już sprawdzoną techniką potwierdzoną przez wiele badań naukowych.

- Kontrola bramy mobilizacyjnej włókien nerwowych

aby zablokować ból przed tym jak dotrze do ośrodkowego układu nerwowego. Zabieg z segmentalną i ponad-segmentalną kontrolą w częstotliwości 10-80 Hz.

- Wyzwolenie endorfin, opioidów

które kontrolują odczuwanie bólu, przy użyciu niskiej częstotliwości stymulacji 1-10Hz

Przy użyciu igieł lub naklejanym na skórę elektrod

ESTETYKA I ELEKTROLIPOLIZA

Rezultaty estetyczne są wzmacniane przez uzupełniającą terapię akupunkturową, w szczególności nakierowaną na zredukowanie apetytu i poprawę dystrybucji wody w organizmie.

Kontrolowana z użyciem częstotliwości stymulacja dzięki Agistim Duo daje wyśmienite wyniki w redukcji zlokalizowanego miejscowo cellulitu już po kilku tygodniowych sesjach.

Stymulacja skóry właściwej przywraca barwę skóry redukując linie i osłabione punkty.

Zestaw do lipolizy pozwala na podłączenie do 16 igieł jednocześnie.

Igły Sedatelec ASE zostały zaprojektowane specjalnie do tego typu aplikacji (diamentowa końcówka).

Skuteczność dzięki innowacji SCFO*

Pomysłowy program stałej częstotliwości impulsu oscylującego wokół wybranej częstotliwości znacząco redukuje ryzyko fizjologicznego przyzwyczajenia organizmu do stymulacji.

**Statistically Controlled Frequency Oscillation - Statystycznie Kontrolowana Oscylacja Częstotliwości: proces opatentowany na wyłączność przez Sedatelec*

Prostota

- 2 niezależne stymulatory w tym samym urządzeniu (podwójna funkcja)
- Oddzielne przyciski do ustawienia czasu, częstotliwości i intensywności
- Wielojęzyczny ekran kontrolny (dostępne języki: angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, holenderski)
- 4 niezależne kanały
- 2 do 16 kolorowych złączek
- Stymulacje poprzez igły lub naklejane na skórę elektrody
- 60 minutowy czasomierz

Maksymalne bezpieczeństwo

- Kompletna izolacja od głównego źródła zasilania
- Funkcja bezpieczeństwa zapobiega rozpoczęciu zabiegu bez zresetowania intensywności do zera
- Alarm „stop” jeśli częstotliwość lub tryb emisji zmieni się w trakcie zabiegu
- 4 elektrycznie izolowane kanały

Dzięki oryginalnemu designowi, złączki do igieł zapewniają idealny kontakt z igłą, jednocześnie zapewniając pełną izolację od skóry.

Podczas leczenia pacjent może dostosować intensywność każdego kanału samodzielnie, ponieważ nie można tego zrobić w niewłaściwy sposób.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

STYMULACJA

Liczba kanałów:	4 izolowane elektrycznie kanały (8 igieł lub elektrod) podzielone na dwie grupy
Typ prądu:	zmienny, pulsacyjny o wartości średniej równej zero
Forma impulsów:	asymetryczna prostokątna fala
Czas trwania impulsów:	0,5 ms.
Amplituda impulsów:	niezależna regulacja w każdym kanale: od 0 do 12 mA
Maksymalna intensywność RMS na kanał:	4 mA przy 1000 W
Maksymalne bezpośrednie obciążenie:	100 µA
Niezależna regulacja częstotliwości impulsów w dwóch grupach:	od 1 do 9,9 Hz w krokach co 0,1 Hz od 10 do 99 Hz w krokach co 1 Hz lub przez wybór częstotliwości Nogiera: 1,14 - 2,28 - 4,56 - 18,25 - 36,50 - 73 Hz
Tryby emisji:	identyczne lub w 2 grupach: ciągła częstotliwość - krótki czas spoczynku - długi czas spoczynku - skanowanie częstotliwości

ZASILACZ

Przy pomocy specjalnego adaptera bezpieczeństwa:	230 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz
Średnie zużycie:	5,4 VA
Stopień bezpieczeństwa elektrycznego:	typ BF

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne:	60 x 230 x 300 mm
Waga całkowita:	1270 g

W zestawie z walizką do przenoszenia

Opcjonalny zestaw baterii

KLASYFIKACJA

Klasa IIa zgodnie z MD 93/42 CEE

GE0123

DYSTRYBUTOR

TCM Brand Sp. z o.o. • NIP 6762490342 • ul. Winnicka 52 • 30-394 Kraków • Polska
Tel. +48 695 849 178 • kontakt@tcmsklep.pl • www.tcmsklep.pl

PRODUCENT

Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tel. +33 (0) 472 663 322
Fax +33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

AGISTIM DUO

URZĄDZENIE DO ELEKTRONICZNEJ STYMULACJI
CZĘSTOTLIWOŚCIAMI NOGIER'A

Akupunktura
Leczenie bólu
Aurikuloterapia
Medycyna estetyczna

*Wybierz AGISTIM DUO aby zwiększyć efekty leczenia akupunkturowego,
skutecznie złagodzić ból lub zredukować nieestetycznie zlokalizowany cellulit!*

Wielofunkcyjne urządzenie do profesjonalnego użytku

Częstotliwości nogierowskie od 1 do 100 Hz

Tryby leczenia ze stoperem

4 kanały umożliwiają użycie naraz nawet 16 igieł

 TCMsklep.pl