

3 PODSTAWOWE PROGRAMY

Znieczulenie-

Program leczenia bólu (częstotliwości od E do G) obniża przekaz informacji o bólu do centralnego układu nerwowego.

Jego lokalne działanie w procesach zapalnych poprawia odczucia pacjenta i miejscową reakcję.

Regeneracja tkanek-

Ten program (częstotliwości A,B i F) przyspiesza rekonstrukcję tkanki, przywraca działanie komórek, przyspiesza proces regeneracyjny i samouzdrawiania tkanek powierzchniowych i głębszych.

Relaksacja mięśni-

Ten program (częstotliwości C, D i G) ułatwia odprężenie napięć i skurczy.

1 PROGRAM UNIWERSALNY

Skanowanie częstotliwości Nogier'a-

Skanowanie częstotliwości Nogier'a od A do G:

sukcesywne emitowanie wszystkich częstotliwości Nogier'a (częstotliwości A,B, C, D, E, F i G)

INDYWIDUALNY WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI

Każda z 7 częstotliwości Nogier'a może być wybrana indywidualnie. Każda z częstotliwości oddziałuje na konkretne funkcje fizjologiczne.

7 PODSTAWOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI NOGIER'A

Współczesna medycyna częstotliwościowa jest oparta na pracach dr Paula Nogiera. Siedem podstawowych częstotliwości zostało opracowanych na bazie metodycznych badań naukowych.

Częstotliwości:

A (2,28 Hz)

B (4,56 Hz)

C (9,12 Hz)

D (18,25 Hz)

E (36,5 Hz)

F (73 Hz)

G (1,14 Hz)

Ludzkie ciało reaguje preferencyjnie na stymulację na określonych częstotliwościach lub asocjacjach częstotliwości.

Programy terapii częstotliwościowej-

Zapewniają one wybiórczą biostymulację zdolności reaktywnych pacjenta. W leczeniu niektórych zaburzeń kombinacja różnych częstotliwości nogierowskich działa synergicznie, pobudzając uzupełniające się wzajemnie funkcje biologiczne.

Indywidualne częstotliwości-

Dokładny wybór częstotliwości zmobilizuje receptory, które przekażą informacje centralnemu układowi nerwowemu, wyzwalając odpowiednie reakcje fizjologiczne.

Renomowane doświadczenie w technologii lasera super-pulsacyjnego

Krótkie serie impulsów (superpulsacyjna emisja) są ustawione na częstotliwości nogierowskie. Dostarczają one energię 2 Dżuli na minutę o szczytowej mocy 40 Watt.

Tryb o szczytowej mocy impulsu 40 Watt dostarcza promień lasera umożliwiający dotarcie d najgłębiej położonych komórek wraz z niezbędną informacją skutecznie mobilizującą lokalne zasoby organizmu.

Komórki stymulowane są przez krótki okres czasu z wystarczającą energią by wyzwolić pożądaną reakcję biologiczną.

Emisja przy zredukowanej mocy (=15W) jest możliwa dzięki końcówce ERP dla obszarów, gdzie znajdują się cieńsze tkanki (błony śluzowe) lub dla delikatnych części ciała (twarz).

Optymalna efektywność-

Emisja podczerwieni o długości fali 905 nm przechodzi przez barierę skóry i dociera do komórek głębszych bezpiecznie przechodząc bez absorpcji przez znajdującą się w skórze wodę, hemoglobinę lub melaninę.

Krótki czas zabiegu-

30 sekund do 1 minuty.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

STYMULACJA

Liczba kanałów:	4 izolowane elektrycznie kanały (8 igieł lub elektrod) podzielone na dwie grupy
Typ prądu:	zmienny, pulsacyjny o wartości średniej równej zero
Forma impulsów:	asymetryczna prostokątna fala
Czas trwania impulsów:	0,5 ms.
Amplituda impulsów:	niezależna regulacja w każdym kanale: od 0 do 12 mA
Maksymalna intensywność RMS na kanał:	4 mA przy 1000 W
Maksymalne bezpośrednie obciążenie:	100 µA
Niezależna regulacja częstotliwości impulsów w dwóch grupach:	od 1 do 9,9 Hz w krokach co 0,1 Hz od 10 do 99 Hz w krokach co 1 Hz lub przez wybór częstotliwości Nogiera: 1,14 - 2,28 - 4,56 - 18,25 - 36,50 - 73 Hz
Tryby emisji:	identyczne lub w 2 grupach: ciągła częstotliwość - krótki czas spoczynku - długi czas spoczynku - skanowanie częstotliwości

ZASILACZ

Przy pomocy specjalnego adaptera bezpieczeństwa:	230 V / 50 Hz lub 110 V / 60 Hz
Średnie zużycie:	5,4 VA
Stopień bezpieczeństwa elektrycznego:	typ BF

WYMIARY

Wymiary zewnętrzne:	60 x 230 x 300 mm
Waga całkowita:	1270 g

W zestawie z walizką do przenoszenia

Opcjonalny zestaw baterii

KLASYFIKACJA

Klasa IIa zgodnie z MD 93/42 CEE

CE0123

DYSTRYBUTOR

TCM Brand Sp. z o.o. • NIP 6762490342 • ul. Winnicka 52 • 30-394 Kraków • Polska
Tel. +48 695 849 178 • kontakt@tcmsklep.pl • www.tcmsklep.pl

PRODUCENT

Sedatelec • Chemin des Mûriers • F-69540 Irigny • Lyon • France • Tel. +33 (0) 472 663 322
Fax +33 (0) 478 508 903 • sedatelec@sedatelec.com • www.sedatelec.com

PREMIO 32

URZĄDZENIE DO ELEKTRONICZNEJ STYMULACJI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI NOGIER'A

Fizjoterapia
Medycyna sportowa
Lokalna aplikacja
Laseroterapia

4 programy stymulacji:
rozluźniający, regenerujący, przeciwbólowy,
częstotliwości nogierowskie A-G

Wykorzystuje częstotliwości Nogier'a
Wybierane indywidualnie

Niezależne działane przez 10 godzin
Bateria do ponownego naładowania

końcówka obniżająca moc lasera (ERP)
dołączona do zestawu

 TCMsklep.pl